

Air Turbine  
**Ti-Max Z Series**

Z990L / Z890L / Z micro



Create it 

**NSK**

# Unprecedented Power

그 누구도 경험하지 못했던, NSK 사상 최고 출력인 44W\*의 압도적인 파워와 놀랍도록 부드럽고 강력한 절삭력으로 단단한 지르코니아도 쉽고 빠르게 제거하며 진료 시간의 단축은 물론 환자의 진료 스트레스도 효과적으로 줄여 줍니다. 이제 새롭게 태어난 'Ti-Max Z'와 함께 치과 진료에 혁명을 일으킬 시간입니다.

## New Air Turbine Ti-Max Z Series

Z990L / Z890L



# Air Turbine Ti-Max Z Series Technology/Function

Z 시리즈의 DNA를 계승한 'Ti-Max Z' 에어터빈은 업그레이된 여러 기능들과 44W의 고출력으로 한 단계 더 진화하였으며 전 세계 다양한 의사들의 요구에 부응할 수 있도록 NSK의 타협 없는 개발 철학과 최첨단 기술로 완성한 세계 톱클래스 핸드피스 기업의 플래그십 모델입니다.



## 04. 워터라인의 청소 편리성

카트리지를 분리하면 워터라인이 헤드 내부에 노출되도록 설계되어 청소가 더욱 쉬워졌습니다.

## 07. 접근성을 높인 헤드 각도

100°의 헤드 각도는 구치부 접근성을 향상시켰습니다.

## 05. 새로운 4점식 워터 스프레이 구조

버 전체를 효율적으로 냉각하고 가시성을 향상시켰습니다. 또한 2가지 각도로 물을 분사하여 다양한 길이의 버에 대한 냉각 효율도 높였습니다.



## 06. 쉬운 카트리지 교체

카트리지를 사용자가 직접 쉽고 간단하게 교체할 수 있도록 제작하여 수리에 소요되는 시간을 줄임으로써 항상 최상의 컨디션으로 진료할 수 있도록 하였습니다.

## 01. NSK 사상 최고의 44W 파워

"DYNAMIC POWER SYSTEM"에 의한 44W의 고출력으로 높은 절삭력과 함께 0.42MPa의 강한 공기압에도 견딜 수 있는 높은 내구성을 동시에 실현하였습니다.

## 02. 높은 버 고정력을 위한 새로운 칩 메커니즘

새로운 칩 시스템인 'DURAPOWER CHUCK'을 탑재하여 버 슬립 현상 감소와 기존 모델 대비 2배의 내구성을 확보하였습니다.

## 03. 새로운 퀵 스탑 기능

고속 회전 후 1초 안에 급정지 할 수 있도록 퀵 스탑 기능이 헤드 앞뒤에 2중으로 설계되어 버 회전으로 인한 구강내 위험성 감소로 안정성이 크게 향상되었습니다.

## 08. 미끄럼 없는 DURAGRIP 코팅

미끄럽지 않고 굽힘에 강한 NSK만의 독자적인 표면 처리 기술로 내구성 향상과 편안한 그립감을 제공합니다.

## 09. 티타늄 소재의 경량 바디

가볍고 높은 강도를 가진 순수 티타늄 소재로 바디를 제작하였습니다.

## 10. 워터필터로 물 막힘 감소

바디에 워터필터를 적용하여 이물질 유입을 차단하고 물 막힘 현상을 크게 감소시켰습니다.

# DYNAMIC POWER SYSTEM

기존 '3x-Power System'에서 한 단계 더 진화한 NSK만의 독보적 기술인 'DYNAMIC POWER SYSTEM'을 탑재하여 더욱 강력한 파워를 실현하였습니다. 이로 인해 삭제에 상당한 시간이 소요되는 지르코니아도 놀랍도록 부드럽고 빠르게 제거할 수 있습니다. 강력한 파워와 부드러운 절삭력으로 더욱 새로워진 'Ti-Max Z'를 꼭 경험해 보십시오.



### Expanded Exhaust Groove

확장된 배기홈을 통해 정체 현상없이 공기를 빠르게 배출하며 부드러운 배기로 인해 저회전 영역에서도 토크가 크게 증가되었습니다.

### Extended Cylindrical Nozzle

강한 압력에도 안정적인 공기 흐름을 만들어 내도록 분사 노즐의 형상을 최적화하여 높은 효율로 강력한 회전력을 실현합니다.


### Expanded Rotor Blade Surface

면적이 기존 대비 100%(2배) 증가한 넓어진 버킷 형상은 공기의 힘을 손실 없이 회전에 전달하여 높은 토크를 실현합니다.

## 최신 기술의 집약으로 만들어낸 압도적 파워

최신 유체 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 개발된 '3X-Power System'을 한층 더 업그레이드하여 새로운 'DYNAMIC POWER SYSTEM'을 탄생시켰습니다. 기존 시스템 보다 더욱 효율적으로 공기의 힘을 출력으로 변환하는 한편 0.42MPa의 공기압에도 견딜 수 있는 높은 내구성을 실현하여 26W에서 44W\*로 파워를 크게 증가시켰습니다. 기존 모델 대비 약 30%의 절삭시간 단축으로 체어타임이 짧아져 환자의 진료 스트레스 감소에도 효과적입니다.

● 경쟁 제품과의 파워 비교(NSK자료)

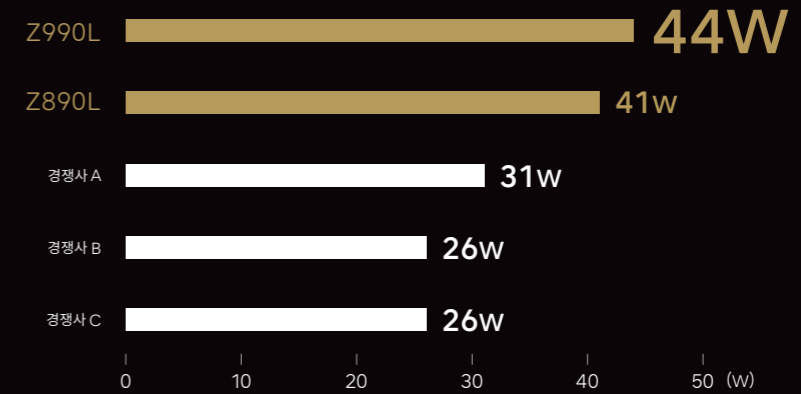

\*각 회사가 지정한 공기 공급 압력




Check out this video that demonstrates its amazing cutting power.

44W의 강력한 핸드피스 파워를 영상으로 확인하십시오. 지르코니아 삭제 동영상

# DURAPOWERTM CHUCK

새로운 척\* 시스템인「DURAPOWER CHUCK」를 탑재하여 기존 모델보다 버 고정력이 크게 향상되었으며 NSK만의 독자적인 구조에 의해 버의 슬립 현상과 떨림이 없이 장시간사용에도 견딜 수 있는 내구성을 실현하였습니다.

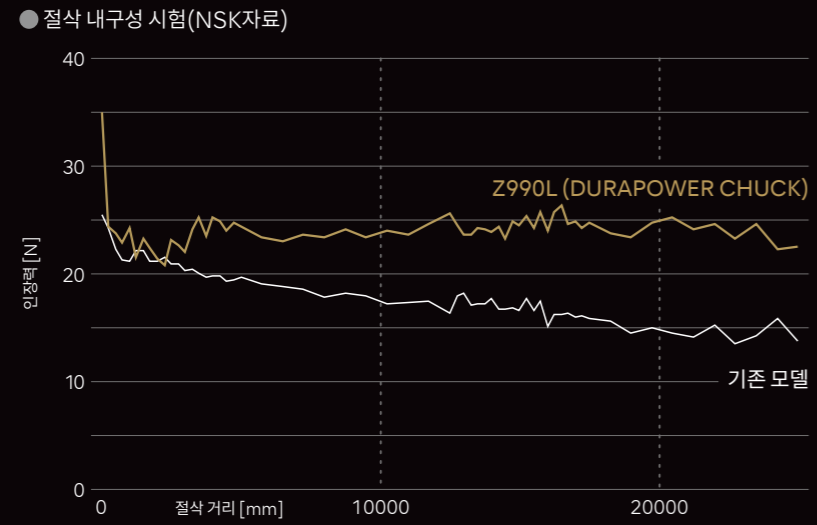

▶ 놀라운 척의 내구성을 영상으로 확인하십시오.  
DURAPOWER CHUCK의 내구성 동영상

## 쐐기효과(wedge effect)로 향상된 그립력

NSK가 독자적으로 개발한 쐐기 형태의 구조가 만드는 강력한 그립력으로 버를 확실히 고정하여 버 빠짐 현상을 방지합니다. (Z Micro / Z Micro KL 제외).



# USABILITY

## 가벼운 티타늄 바디와 100° 앵글 헤드

티타늄을 기반으로 내부 구조를 재설계하여 기존 모델 대비 16%의 경량화를 실현하였으며 구강내의 생리학적 커브(Spee curve & Wilson curve)를 고려해, 100° 앵글 헤드가 구강 내에서의 쉬운 접근성과 편안한 핸들링을 가능하게 합니다.




### ■ Ti-Max Z890L과 Z800L의 비교



## 헤드 크기 옵션

치료에 따라 헤드 크기를 선택할 수 있어 보다 효율적인 치료가 가능합니다.

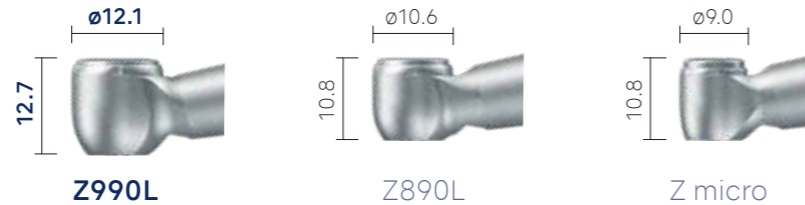


# SAFETY & INFECTION CONTROL

## 퀵 스톱 기능을 갖춘 새로운 클린 헤드 시스템

고속 회전 후 약 1초 이내로 급정지하는 퀵 스톱 기능을 헤드의 앞뒤에 탑재하여 구강 내에서 버의 관성회전에 의한 부상 위험을 감소시킵니다. 또한 회전 후 발생하는 썩백(Suck back)을 방지하는 클린 헤드 시스템 기능으로 위생 안전성도 향상되었습니다.

\*퀵스탑 기능은 Z990L / Z890만 해당

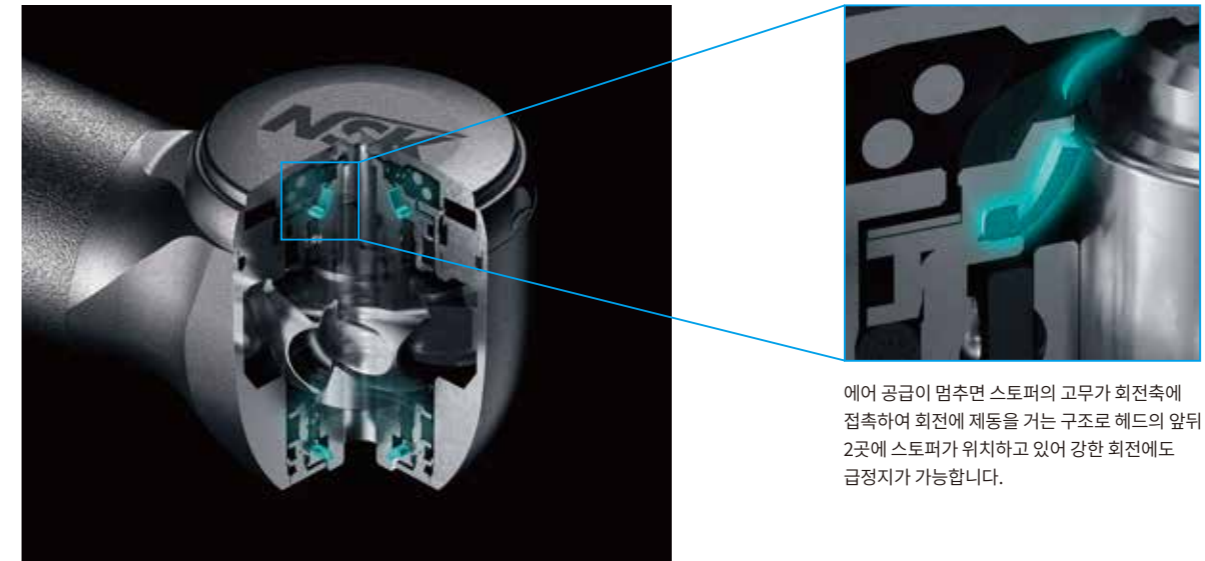


에어 공급이 멈추면 스톱퍼의 고무가 회전축에 접촉하여 회전에 제동을 거는 구조로 헤드의 앞뒤 2곳에 스톱퍼가 위치하고 있어 강한 회전에도 급정지가 가능합니다.

## 마이크로 필터

직경 0.3mm의 그물 구조의 정수 필터가 내장되어 있어 이물질이 급수관으로 유입되는 것을 방지하여 막힘 문제를 줄여 줍니다. (Z Micro / Z Micro KL 제외).



\*Z990L / Z890만 해당

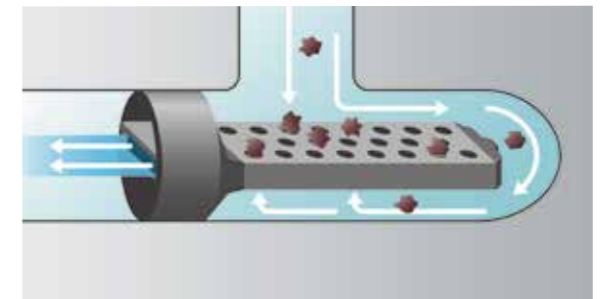

# DURAGRIP

## 미끌림과 스크래치에 강한 표면 처리 기술 "DURAGRIP"

순수 티타늄 바디의 매끈한 표면을 블라스팅 하여 미세한 요철을 만들어 낸 후 NSK의 독자기술인 "DURAGRIP" 코팅 처리를 합니다. 스크래치에 강해 내구성이 올라가는 동시에 표면의 요철에 의해 미끄러지지 않는 편안한 그립감을 제공합니다.

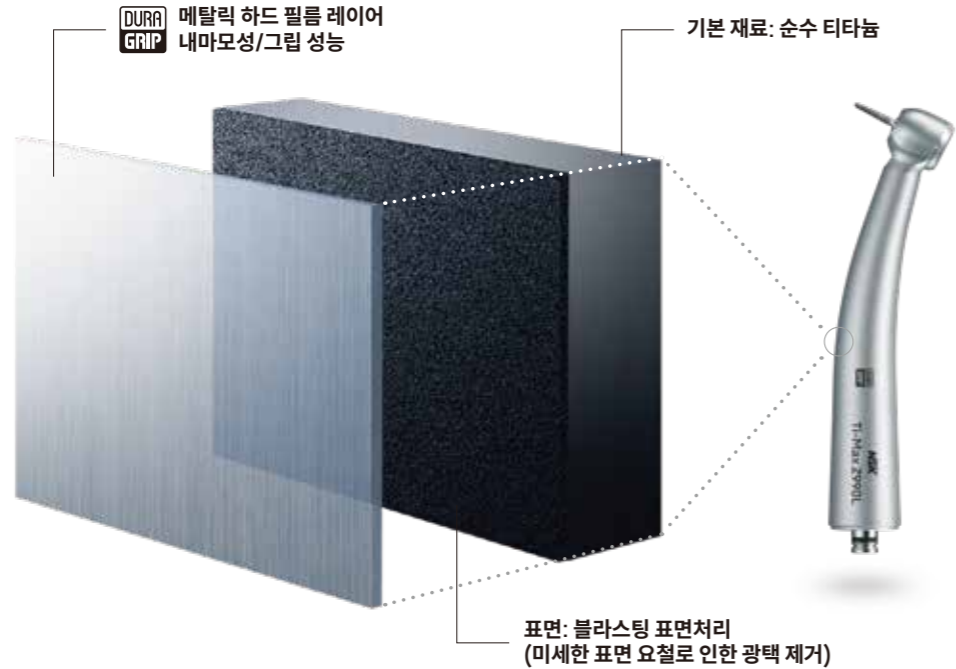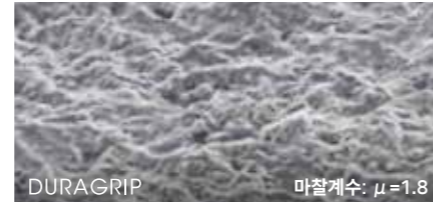


# MAINTENANCE

## 3단계로 쉽게 교체할 수 있는 카트리지

카트리지는 3단계에 걸쳐 간단하게 교환할 수 있도록 제작되었으며 수리에 소요되는 시간을 크게 줄여 항상 좋은 컨디션에서 제품을 사용할 수 있도록 합니다. (자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.)

- 1** 제공된 렌치를 헤드캡에 결합하여 반 시계 방향으로 돌리면 헤드캡을 분리할 수 있습니다.
- 2** 버를 위 방향으로 밀어 올리면 헤드에서 카트리지가 분리됩니다.
- 3** 새 카트리지를 삽입하고 헤드캡을 렌치로 조이면 교체가 완료됩니다.

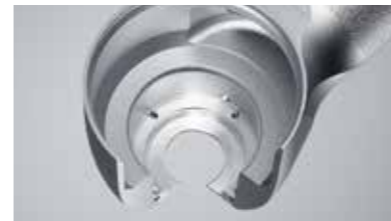

### 워터라인 청소

헤드에서 카트리지를 분리하면 워터라인을 쉽게 청소할 수 있도록 설계하였습니다.  
\*전용 클리닝 와이어 동봉

# LINE UP



DYNAMIC POWER SYSTEM\*  
 DURAPOWERS CHUCK\*  
 100° 각도 헤드  
 티타늄 바디 & DURAGRIP  
 세라믹 볼 베어링  
 글라스 로드 라이트  
 클린 헤드 시스템  
 퀵 스톱 기능  
 푸시버튼 척  
 심플 카트리지 교환  
 워터필터 내장  
 4점 주수 스프레이

\*Z990L / Z890만 해당



Z990L

**스탠다드 헤드**

- 최대 파워: 44W
- 회전 속도: 280,000-360,000 min<sup>-1</sup>
- 헤드사이즈: Φ12.1 x H 12.7 mm
- DURAPOWERS CHUCK



Z890L

**미니 헤드**

- 최대 파워: 41W
- 회전 속도: 320,000-400,000 min<sup>-1</sup>
- 헤드사이즈: Φ10.6 x H 10.8mm
- DURAPOWERS CHUCK



Z micro

**마이크로 헤드**

- 최대 파워: 20W
- 회전 속도: 380,000-450,000 min<sup>-1</sup>
- 헤드사이즈: Φ9.0 x H 10.8 mm

## 각사 커플링 적용 모델

		NSK	KaVo®
스탠다드 헤드	모델명	Z990L	Z990KL
	코드번호	PA23730001	PA23750001
미니 헤드	모델명	Z890L	Z890KL
	코드번호	PA23720001	PA23740001
마이크로 헤드	모델명	Z micro	Z micro KL
	코드번호	PA2357	PA2358

## 수리용 부품

모델명	제품사진	코드번호	모델명	PRODUCTS	코드번호	모델명	제품사진	코드번호
<b>TiZ9-SU03</b> 스탠다드 헤드용 카트리지		PA2381X001	<b>TiZ9-SU04</b> 스탠다드 헤드용 헤드캡		PA2381X050	<b>TiZ9-SU05</b> 미니 & 스탠다드 헤드용 헤드캡 렌치		PA2381X765
<b>TiZ9-MU03</b> 미니 헤드용 카트리지		PA2380X001	<b>TiZ9-MU04</b> 미니 헤드용 헤드캡		PA2380X050	<b>SX-NU05</b> 마이크로 헤드용 헤드캡 렌치		PA2307X765
<b>SX3-NU03</b> 마이크로 헤드용 카트리지		PA2307X001	<b>SX-NU04</b> 마이크로 헤드용 헤드캡		PA2307X050	<b>클리닝 와이어</b>		Z144101
<b>S970 O링 세트</b> Z990L, Z890L		Y1001953	<b>PTLO-링 세트</b> Z micro		Y900580			

KaVo와 Multiflex는 Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.의 등록 상표입니다.

제조원  
 주식회사 나카니시 www.nsk-dental.com  
 일본 토치기현 가누마시 시모하나타700

수입업자  
 엔에스케이덴탈코리아(주) www.korea.nsk-dental.com  
 서울특별시 영등포구 양평로 21가길 19 501~504호

사양이나 형상은 예고없이 변경될 경우가 있으므로 양해바랍니다.

